

Betjeningsvejledning



Cargo9000 El-kabinescooter (trehjulet)

Modelnummer CNPW6-800

Tak fordi du har valgt at købe netop vores produkt. Vi er sikre på, at du bliver glad for dit nye komfortable køretøj. Hvis du følger vores anbefalinger i denne manual, og i øvrigt passer godt på køretøjet, tør vi godt sige, at du kan få glæde af det i mange år fremover.

Din kabinescooter er samlet og gennemtestet på vores danske værksted inden du modtager den, men du har naturligvis to års reklamationsret på fabriksfejl. Husk at gem dit købsbevis eller faktura. Skulle du være så uheldig selv at ødelægge noget på scooteren, står vores værksted naturligvis parat til at yde service både før og efter garantiperiodens udløb.

Denne manual indeholder oplysninger om daglig brug og vedligehold af din nye kabinescooter. Det er vigtigt at læse manualen, inden du tager dit nye køretøj i brug, og at du gemmer den, da du kan få brug for den senere.

Følg altid nedenstående tjekliste for en sikker kørsel:

- Tjek jævnlgt, om der skal luft i hjulene (trykket skal være på 2,5 bar/250 kpa/36,3 psi)
- Tjek om bremserne fungerer, som de skal
- Sørg for at førersædet er indstillet så komfortabelt som muligt
- Hav altid bakspejlet justeret i en vinkel, så du har frit udsyn til det
- Tjek batteriniveauer inden du bevæger dig ud på en køretur
- Sænk farten med håndtaget, når du skal dreje, og køre op ad en sliske eller fortovs kant
- Sluk altid køretøjet, når du stopper, og træk håndbremsen
- Opfører teknikken eller elektronikken sig forkert skal du straks benytte hovedafbryderen

Bemærk! Får du selv modificeret dele af kabinescooterens teknik, herunder batterier, lygter og øvrige elektriske dele, kan du risikere, at mekanikken svigter. Pil derfor ikke ved kabinescooterens originale konfiguration. Hvis du gør det alligevel bortfalder garantien, og du risikerer en bøde, hvis du bliver stoppet af politiet eller andre myndigheder.

Stelnummer

Bag forhjulet kan du se stelnummeret. Du kan få brug for nummeret, hvis din kabinescooter bliver stjålet, og du skal foretage en anmeldelse til politi og forsikringselskab.

Dit stelnummer er: _____



Display

Blinklys (blinker, når tændt)

Speedometer

Lys (vises, når tændt)

Voltmeter

Distance

Tidsforbrug

Strømindikator



Tændingskontakten



Off: Maskinen er slukket, og du kan isætte nøglen for at dreje over på On.

On: Maskinen er tændt, og du kan starte maskinen. Nøglen kan ikke tages ud, når den står i denne position.

Drej altid nøglen over på Off, og træk håndbremsen, når du parkerer for mere end et rødt lys

Venstre styrehåndtag

Håndbremse

Blinklys: Slukket, når knappen står i midterste position.

Lys. Slukket i midterste position

Båthorn



Funktionsknapper (findes i venstre side)


Hastighed: Her kan du med et tryk regulere om max hastigheden skal være 15 eller 25 kilometer i timen.

Bakkekørsel: På almindelig flad vej bør denne knap stå i position O, ved bakket terræn kan denne funktion med fordel anvendes ved at skifte til position I.

Bremseindstilling:

Position O: Standardindstilling

Position I: Bremses mere følsomt, og altså ikke så brat som ved standardindstillingen.

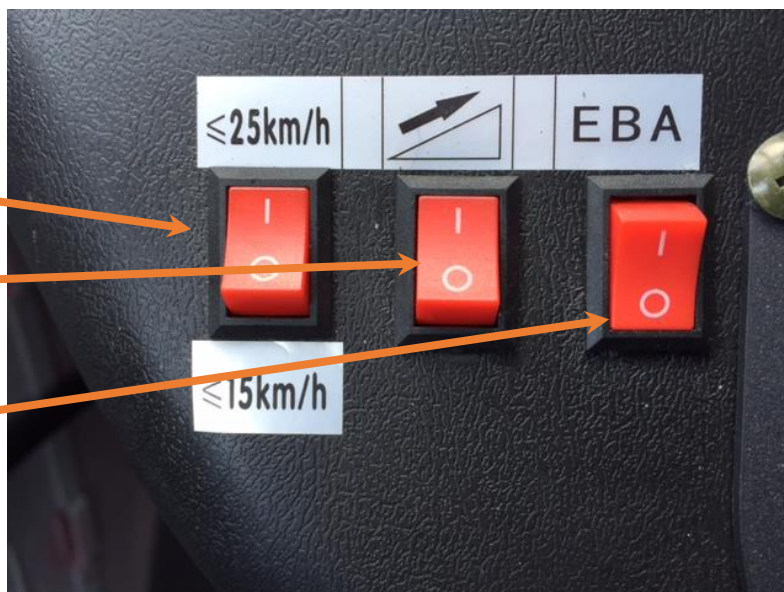

Højre styrehåndtag:

Bremse

"Gashåndtag": Her hæver du farten ved at dreje håndtaget ned, mens du kører. Giv forsigtigt gradvist slip for at sænke farten og til sidst at bremse helt.

Fremdrift og bakgear: Tryk knappen over på bakgear, når du skal vende og bakke.

Vinduesviskere til eller fra.



Hovedafbryder

Findes under førersædet.

Rul sidevinduer op og ned vha. håndtaget på indersiden af dørene.



Sædejustering

foregår ved hjælp af håndtaget i højre side, som du skal løfte for at justere. Vær sikker på, at sædet har låst sig fast på skinnen igen, når du har indstillet det til den ønskede position.




Dørlås

Når døren er låst isættes nøgle og drejes til vandret position. Fjern nøglen, og tryk knappen ind med tommelfingeren, imens du hiver i håndtaget for at åbne døren.

Husk altid at låse din kabinescooter.

Påfyldning af motorolie

1: Sæt en tom plasticæske eller lignende ind under motoren.

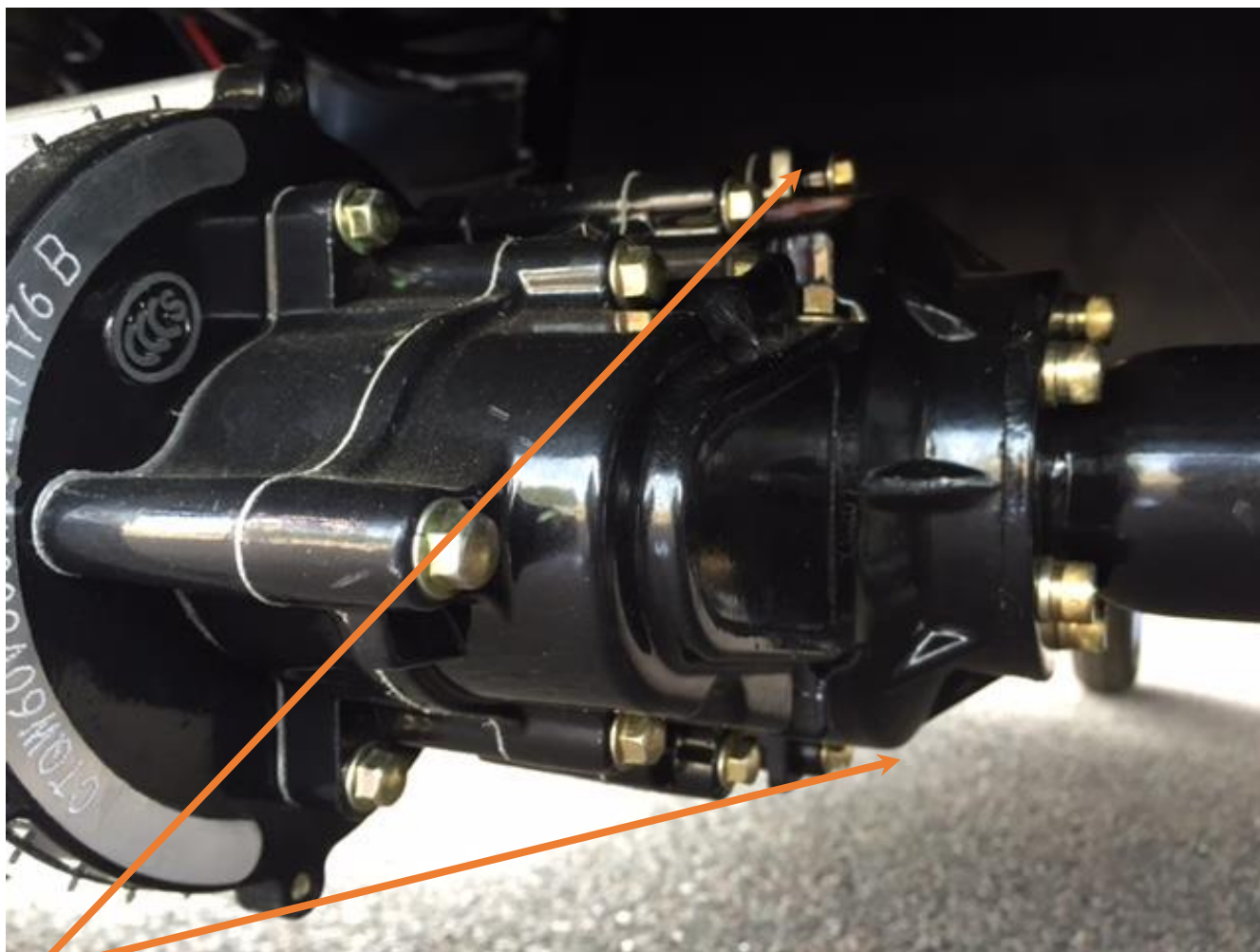


2: Fjern både den øverste og nederste bolt

3: Lad den gamle olie rende ud

4: Sæt nu den nederste bolt i igen, så den nye olie ikke render igennem.

5: Hæld ny olie på foroven, og skru den øverste bolt på igen.

Bremsesystem, hjul og dæk

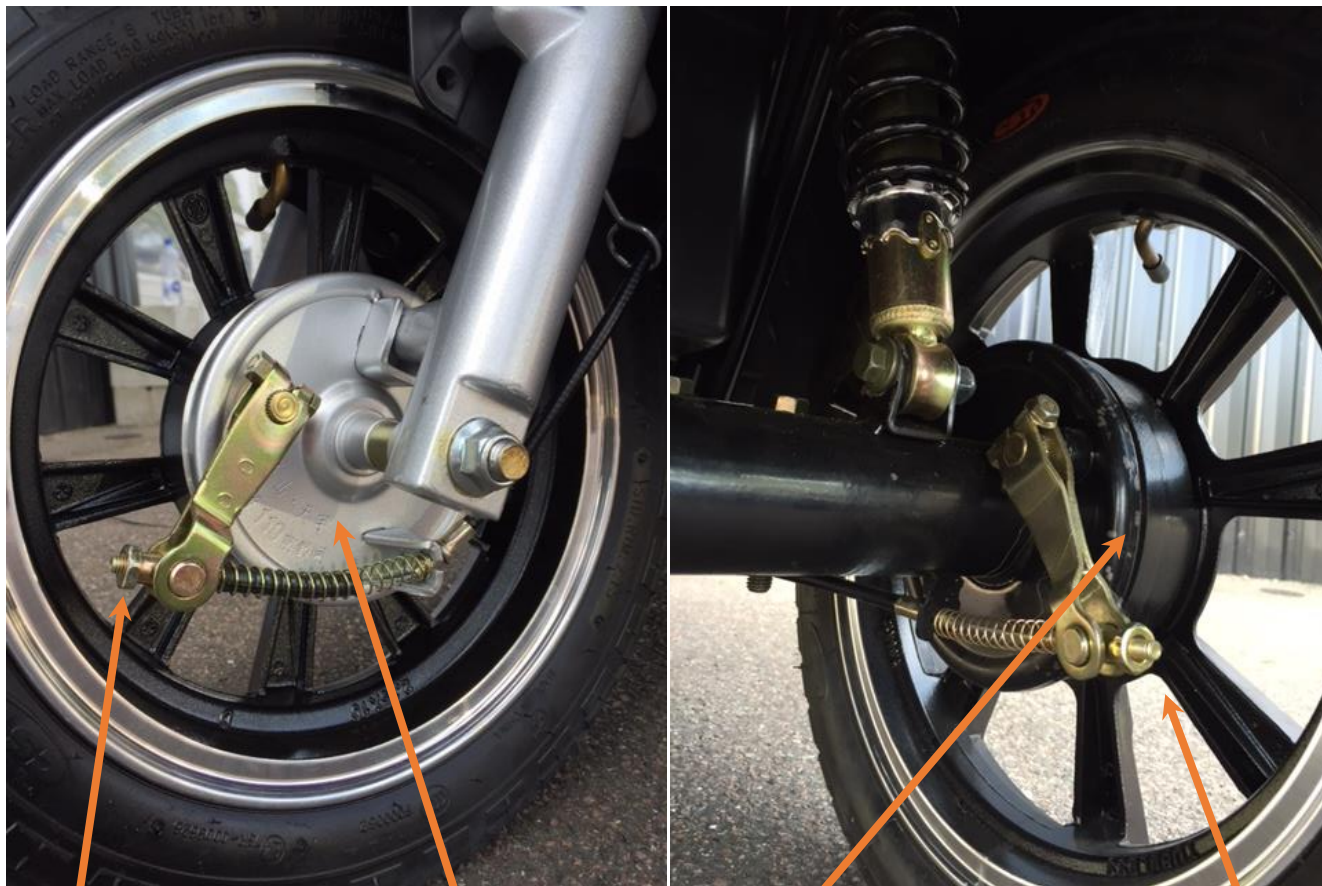

Justeringsbolt

Tromlebremsen på forhjulet

Tromlebremse på baghjul

Justeringsbolt

Ved at spænde eller løsne justeringsboltene kan du gøre dine bremsere mere eller mindre stramme. Det kan være en fordel, at de ikke er helt spændt, da en brat opbremsning typisk kan være hård.

At bremserne fungerer korrekt er noget af det vigtigste for din egen og medtrafikanternes trafiksikkerhed. Vær derfor altid opmærksom på, at justere og spænde bremserne, når du kan mærke, at det er påkrævet. Det er også vigtigt, at bremsekablerne er korrekt forbundne.

Ved længerevarende brug kan det ikke undgås, at tromlerne en dag skal skiftes ud. Kontakt altid Cargo9000, hvis du er i tvivl.

Du kan også få brug for at få nye dæk på dine kabinescooter. Sørg altid for at dækmønsteret er minimum 1,5 mm dybt på fordækket og 2 mm dybt på bagdækkene.

Luftrykket i dækkene skal være på 2,5 bar/250 kpa/36,3 psi. Du påfylder luft via ventilen i fælgen.

Batteri og oplader

Du oplader din kabinescooter med den medfølgende oplader, som tilsluttes en 220 v-stikkontakt.

Når dioden på opladeren lyser rødt er scooteren ved at lade op. Den lyser grønt, når den er færdig. Det kan tage op til 12 timer at lade et helt tomt batteri op.

Det er sundest for batteriet, at det bliver fuldt opladet mindst én gang månedligt, men du kan også sagtens gøre det dagligt, når du har været ude og køre. Viser displayet at batteriet er nede på cirka 25 procent, bør du altid oplade det inden du kører.

Hvis batteriet pludseligt ikke kan køre så langt, kan det være beskadiget. Kontakt da Cargo9000 for at få det eftersat, repareret eller udskiftet. Batteriernes levetid er meget individuel alt afhængig af forbruget. Batteriernes distance er cirka 55 kilometer, men dette afhænger blandt andet af vejr og vind, bakket terræn, førerens vægt og slitage.

Vigtigt: Benyt kun en original oplader til din Cargo9000 El-kabinescooter. Selvom stikket fra en anden oplader skulle passe, er det ikke sikkert, at en anden oplader vil afgive den korrekte mængde strøm, hvilket kan medføre overophedning, og i værste fald brand.

Sørg også altid for, at din oplader befinder sig et sted med gode luftforhold, og står frit. Læg fx aldrig opladeren oven på tekstiler, og dæk aldrig opladeren til med let brandbart materiale, da den kan blive varm. Overstiger opladeren en temperatur på over 65 grader celsius bør du straks afbryde opladningen.

Ved gennemsnitligt forbrug af din kabinescooter kan du nøjes med at hælde nyt destilleret vand på batterierne cirka hver fjerde måned.

Tekniske data:

Længde: 2 meter	Bredde: 1,02 meter	Højde: 1,56 meter
Hastighed: 15/25 km/t	Rækkevidde: op til 60 km	Stigningsevne, v.135 kg: 20 %
Motor, max: 800 W	Venderadius: 215 cm	Batterier: 10 stk. 120 v, 20 AH
Batterivægt pr stk.: 7,2 kg	Max. personvægt: 180kg	Scooterens vægt u. batterier: 90 kg

Den maksimalt tilladte hastighed for el-scootere er normalt 15 km/t. Trafikstyrelsen har dog godkendt Cargo9000 El-kabinescooteren til at måtte køre 25 km/timen og uden kørekort, hvis blot man er 18 år. Er man under 18 år skal man have knallertkørekort. Det er nødvendigt at tegne en lovpligtig knallertforsikring. Herudover bør man også overveje at tegne en kaskoforsikring



Importør og forhandler:

Cargo9000 ApS.
Snedkervej 1
6710 Esbjerg V

Kundeservice:

Cargo9000.dk
info@cargo9000.dk
23 92 82 28